

# HbA1C afisat in cateva minute

## Informatii rapide la punctul de ingrijire



Sistemul A1CNow+ este unul dintre primele tehnologii care ofera profesionistilor din domeniul sanatatii un acces imediat la starea cantitativa A1C " indicatorul standard de aur in gestionarea bolilor cronice " fara timp, costuri ridicate si complexitatea referintelor de laborator.

Mai eficient decat laboratorul


- Rezultate in 5 minute
- Proba de sange mica (5 $\mu$ L)
- Portabil
- Usor de utilizat
- Fara mentenanta

# A1C Now+

# HbA1c afisat in cateva minute

Informatii rapide la punctul de ingrijire


## A1CNow+

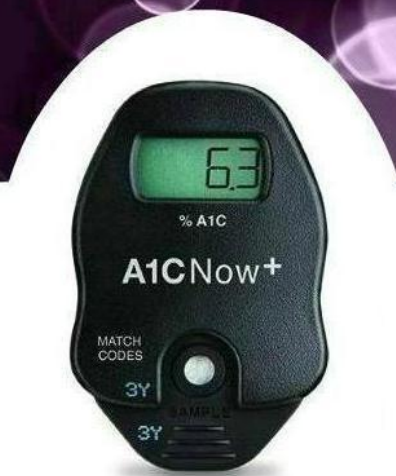


Cu o picatura de sange si doar 3 pasi simpli, testul poate fi efectuat in cabinetul unui medic sau de catre pacient la domiciliu.

Odata ce proba diluata se adauga la analizat, nu exista pasi suplimentari, iar rezultatele sunt disponibile in aproximativ in 5 minute.

### Testarea cu A1CNow+ se realizeaza astfel:

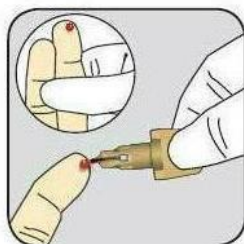

1. Atingeti cu grija picatura de sange pentru umplere. (sunt necesari doar 5 $\mu$ l de sange).

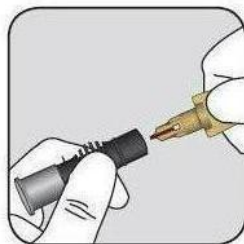

2. Introduceti colectorul de sange in corpul sample-rului.



3. Apasati cu grija, indepartati dupa o secunda. Rezultatele vor aparea in aproximativ 5 minute.



### Achizitionati-va A1CNow+ personal.

Hemoglobina glicozilata se coreleaza cu glucoza din sange, oferind o medie a nivelului de zahar din sange in ultimele 2-3 luni cu aproximativ 50% din punctajul provenind din ultimele 30 de zile.

In cazul in care Hemoglobina glicozilata este mare, schimbari de dieta, exercitiu fizic si, eventual, medicamente pot ajuta la reducerea acesteia, ceea ce ar putea contribui la reducerea ricurilor pacientului. Discutati cu medicul dumneavoastra despre schimbarile necesare.

S-a demonstrat ca o reducere de 1% a Hemoglobinei glicozilate scade riscul de complicatii, cum ar fi cele oculare, renale si a neuropatiei cu 40%.

Pentru mai multe detalii va stam la dispozitie:



Str. Diligentei, Nr. 39, Sectorul 3, Bucuresti,  
Romania 031555  
Tel/Fax: +40317305922  
email: office@eromediks.ro

